



テルモメディカルケア株式会社は  
エア・ウォーター・メディカル株式会社  
に生まれ変わりました。



安心と  
快適を求めて。  
暮らしに寄り添う  
「いぶき」。



5L器 酸素濃縮装置

オーツ  
O<sub>2</sub>グリーン

いぶき™

5SP



火災防止機能



バッテリーバックアップ

毎日、使うものだから。  
「いぶき」は、暮らしに寄り添います。

暮らし慣れた生活環境のもとで、  
より快適に、安心・安全に在宅酸素療法を行っていただくために。

「O<sub>2</sub>グリーン いぶき」は、操作性、安全性に十分配慮し、  
さらにデザイン性にもこだわった、  
患者さまの声に応える、コンパクトな高流量酸素濃縮器です。




## 5L器初 バッテリ搭載<sup>※1</sup>

5Lタイプ初のバッテリー搭載器<sup>※1</sup>。停電や災害時にも安心。  
家庭用電源が供給されなくなると、自動的に内蔵バッテリーでの動作に切り替わり、  
最長75分<sup>※2</sup>の使用が可能。停電時や災害時にも安心です。

**Battery Backup**

バッテリーバックアップシステム搭載

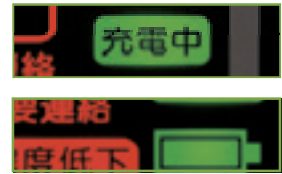

充電ランプとバッテリー運転ランプ

内蔵バッテリーで使用できるおおよその時間

流量	0.25~2.00 L/分	2.50~3.00 L/分	3.50~4.00 L/分	4.50~5.00 L/分
運転時間	75分	60分	40分	30分

(新品満充電時 23℃環境の場合)

## 5L最小・最軽量<sup>※1</sup> + 省エネ設計

5Lタイプで  
最小・最軽量クラス。<sup>※1</sup>  
設置場所を選びません。

5Lタイプでは最小・最軽量クラス。従来器に比べ30%以上軽量化しました(当社比)。設置場所を選ばず、スペースもとりません。

62.5cm




35cm

29.5cm


人と環境に優しい、省エネ設計。

流量に合わせてコンプレッサーの動きを細かく制御することで、使用電力を削減しました。

従来の酸素濃縮装置に持たれていた患者さまの要望

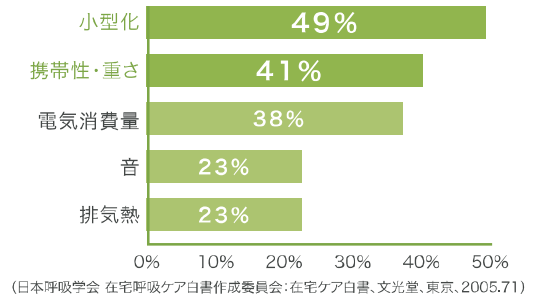

1ヶ月あたりの電気代負担比較 (3L/分の場合)

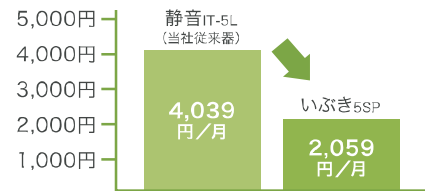

※新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算。

## 安全性への配慮

万一の火災発生時の延燃を防ぐための新機能、「火災防止機能」を搭載。

万一、鼻カニューラや延長チューブに引火し、本体の酸素出口部の温度の上昇を検知した場合に、自動的に酸素の供給を停止させる機能を搭載しています。

難燃性  
カプラソケット



本体酸素出口部

## 生活空間になじむデザイン

毎日の暮らしに、  
しっくりなじむデザイン&カラー。

「O<sub>2</sub>グリーン いぶき」は、シンプルなデザインとカラー。生活空間のじゃまにならず、毎日の暮らしにしっかりと溶け込みます。



コンパクトで落ち着いたデザイン



カニューラ掛け



巻き取り式の電源コード

※1:日本国内で現時点で販売されている5Lクラスにて(弊社調べ)。 ※2:流量0.25~2.00L/分・新品満充電時23℃環境の場合。

## 音声ガイダンス・警報アイコン

音声ガイダンス&警報アイコンで、  
より安心に、使いやすく。

加湿器外れやカニューラ折れなど、ご使用上のトラブルが発生した場合、音声とアイコン(イラスト)による警報表示で、わかりやすくお知らせします。

バッテリーで  
運転しています

酸素流量を  
設定します



音声ガイダンスでお知らせします



※警報アイコン、流量インジケータは、撮影のために全点灯しています。

## 仕様

コード番号	ZS-IT5B01	使用条件	周囲温度 5~35°C 相対湿度30~75%(結露のないこと) 使用気圧900~1,060hPa(標高約1,000mまで)
寸法	高さ625×幅350×奥行295mm	酸素濃度	88~95%
重量	23kg	酸素流量 (L/分)	0.25/0.50/0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 3.50/4.00/4.50/5.00
電源	AC100V(50Hzまたは60Hz)	警報	【電源供給停止】電源供給停止表示と音によりお知らせ 【装置異常】【流量異常】【圧力】要連絡表示と音によりお知らせし、装置が停止 【酸素濃度低下】濃度低下・要連絡表示と音によりお知らせ 【チューブ折れ】チューブ折れ表示と音によりお知らせ 【加湿器外れ】加湿器外れ表示と音によりお知らせ 【バッテリー残量】バッテリー残量低下表示と音によりお知らせ
消費電力	流量 5.00L/分…225W 4.00L/分…185W 3.00L/分…130W 2.00L/分…105W 【内部バッテリー使用時】 定格電圧 DC22.2V		
電撃に対する保護	クラスIIおよび内部電源機器 B形装着部		
EMC	JIS T0601-1-2:2002に適合		
運転音 (無響音室平均値)	流量 5.00L/分: 32dB (A) 4.00L/分: 31dB (A) 3.00L/分: 27dB (A) 2.00L/分: 25dB (A)		

改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

販売: エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル7階

製造販売業者: 株式会社 医器研 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山2-12-27

販売名: O2グリーン いぶき5SP 医療機器認証番号: 221AGBZX00301 特定保守管理医療機器

©エアウォーター・メディカル株式会社 2013年11月  
13AWM077