



室内移動も手軽

小夏3<sup>TM</sup>  
SP



地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

# 室内移動がスムーズ。よりア

イキイキとした生活を支える、これまでにない酸素濃



## もっと活動的な毎日を。新しいHOTスタイルのご提案。

旅行に行きたい、カニューラが絡まって大変、大きくて不便…。こうした想いに応える製品、それが「小夏3」です。


大型の車輪と伸縮ハンドル、そして軽量・コンパクト設計により、軽い力でも移動がラクラク。

自宅ではもちろん、各種施設内での使用にも便利です。さらに内蔵バッテリーや延焼防止機能も備え、安心・安全。

一人ひとりの生活シーンに合わせてご使用いただけます。



車での移動

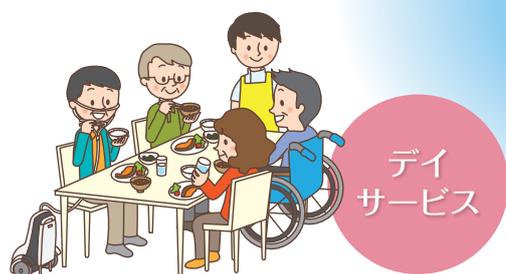

※本製品は、屋内専用です。屋外では使用できません。

# クティブに。

縮装置です。



スルーム



ベッドルーム




## 省エネルギー

### 家計にやさしい省電力設計

長く使うものだからこそ、気になるのは毎月の電気代。「小夏3」は当社従来器比30%以上の省電力を実現しました。流量設定1L/分での1ヶ月当たりの電気代は約680円。長期療養時の電気代負担を大幅に軽減します。

1ヶ月あたりの電気代負担

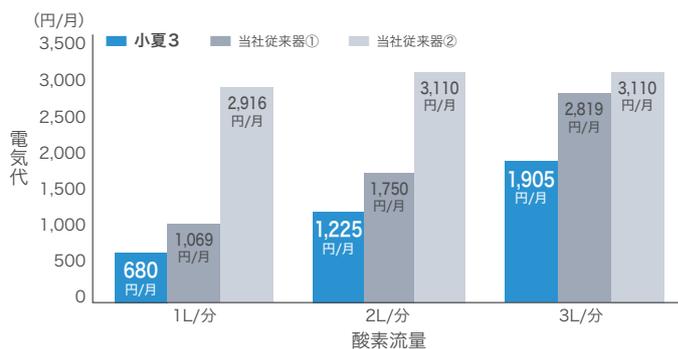


※1kwh27円(税込) (社)全国家庭電気製品公正取引協議会「新電力目安単価」で計算

## 低騒音

### 静かな運転音で夜でも快適

流量設定1L/分での運転音はわずか21dB(A)。これは「木の葉のふれあう音」と同等レベルの静かさです。その他すべての流量設定で、低騒音設計です。夜間や睡眠中でも、快適にご使用いただけます。

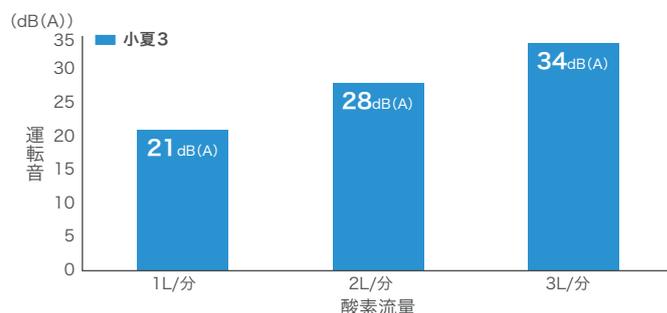

## カートリッジ式バッテリー内蔵

不意の停電やコンセントのない場所でも内蔵バッテリーにより最大約100分使用可能です。

また、カートリッジ式バッテリーを入れ替えることで、バッテリー稼働時間を簡単に延長させることができます。



カートリッジ式バッテリー

流量	運転時間
1L/分	100分
2L/分	60分
3L/分	40分

内蔵バッテリーで使用できるおおよその時間(新品満充電時23℃環境の場合)

## 熱を検知して延焼を防止

鼻カニューラや延長チューブに引火し、本体の酸素出口部の温度上昇を検知すると、自動的に酸素の供給を停止します。



延焼防止機能



バッテリー搭載

## オプション

### 小夏3SPバッテリー(追加分)

コード番号: ZS-IA3AQ



## 仕様

コード番号	ZS-IA3D	運転音 (無響音室平均)	酸素流量 3L/分:34dB(A)
寸法	高さ590×幅330×奥行293mm		酸素流量 2L/分:28dB(A)
重量	9.9kg(バッテリー含む)		酸素流量 1L/分:21dB(A)
電源	AC100V(50Hzまたは60Hz)	使用条件	周囲温度5~40℃ 相対湿度30~75%(結露のないこと)
消費電力	3L/分…98W 2L/分…63W 1L/分…35W  【内蔵バッテリー使用時】電圧 DC25.2V 連続使用時間約60分(3L/分)~180分(1L/分) (新品満充電時、23℃にて測定)	酸素濃度	88%~95%
		酸素流量(L/分)	0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3
		警報	【電源供給停止】コンセントランプの点滅と音によりお知らせ 【装置異常】【流量異常】【圧力異常】要連絡ランプの点滅と音によりお知らせし、装置が停止 【酸素濃度低下】濃度低下ランプと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【バッテリー残量】バッテリー残量モニタと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【チューブ折れ】チューブ折れランプと酸素ランプの点滅と音によりお知らせ 【火気検知】火気検知ランプと要連絡ランプの点滅と音によりお知らせ
電撃に対する保護	クラスIIおよび内部電源機器 B型装着部		

◎当商品は医薬品医療機器等法第二条に定められた医療機器であり、医師の指示のもとに使用してください。  
◎改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。  
◎このカタログの内容は、2023年7月現在のものです。

販売名:小夏3SP  
認証番号:226ADBZX00229000 特定保守管理医療機器

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号  
TEL. 03-3578-7813

製造販売業者:エア・ウォーター・メディカル株式会社(埼玉県川越市南台一丁目5番地1)  
製造業者:エア・ウォーター・メディカル株式会社

23AW009\_SZ