

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

5L器 酸素濃縮装置
オーツ
O₂グリーン

いぶき™
5SP



延焼防止機能

Battery Backup

バッテリー搭載

安心と
快適を求めて。
暮らしに寄り添う
「いぶき」。



毎日、使うものだから。
「いぶき」は、暮らしに寄り添います。

暮らし慣れた生活環境のもとで、
より快適に、安心・安全に在宅酸素療法を行っていただくために。
さらに進化した「O₂グリーン いぶき」は、操作性、安全性に十分配慮し、
さらにデザイン性にもこだわった、
患者さまの声に応える、コンパクトな高流量酸素濃縮装置です。



バッテリー搭載5L器^{※1}

5Lタイプでのバッテリー搭載器。^{※1} 停電や災害時にも安心。
家庭用電源が供給されなくなると、自動的に内蔵バッテリーでの動作に切り替わり、
最長120分^{※2}の使用が可能。停電時や災害時にも安心です。



バッテリー搭載



充電ランプとバッテリー運転ランプ

内蔵バッテリーで使用できるおおよその時間

流量	0.25~1.00 L/分	1.25~2.00 L/分	2.50~3.00 L/分	3.50~4.00 L/分	4.50~5.00 L/分
運転時間	120分	100分	70分	50分	40分

(新品満充電時 23°C環境の場合)

軽量・コンパクト+省エネ設計

5Lタイプで
軽量・コンパクト。
設置場所を選びません。


従来器に比べ15%以上軽量化
しました(当社比)。設置場所を
選ばず、スペースもとりません。



人と環境に優しい、省エネ設計。

流量に合わせてコンプレッサの働きを細かく制御することで、使用
電力を削減しました。

従来の酸素濃縮装置に持たれていた
患者さまの要望

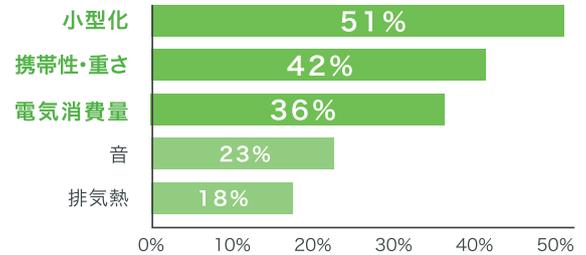

(日本呼吸器学会肺生理専門委員会在宅呼吸ケア白書ワーキンググループ:
在宅呼吸ケア白書 2010. 社団法人 日本呼吸器学会, 東京, 2010:87.)

1ヶ月あたりの電気代負担比較 (3L/分の場合)



流量3L/分 (24時間使用時)

※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算。

安全性への配慮

●万一の火災発生時の延焼を防ぐための機能を搭載。

万一、鼻カニューラや延長チューブに引火し、本体の酸素出口部の温度の
上昇を検知した場合に、自動的に酸素の供給を停止させる機能を搭載しています。



●「チャイルドロック機能」を搭載。

いたずらや意図しない設定変更をふせぎます。



※1=標準搭載では、5L クラス当社のみ。

※2=流量 0.25~1.00L/分・新品満充電時 23°C環境の場合。

音声ガイダンス・警報表示

音声ガイダンス&警報表示で、
より安心に、使いやすく。

加湿器外れやカニューラ折れなど、ご使用上のトラブルが発生した場合、音声とイラストによる警報表示で、わかりやすくお知らせします。

バッテリーで
運転しています

酸素流量を
設定します



音声ガイダンスでお知らせします

警報音停止ボタン



※警報表示、流量インジケータは、撮影のために全点灯しています。

仕様

コード番号	ZS-IA5E	使用条件	周囲温度 5~35°C 相対湿度30~75% (結露のないこと) 使用気圧900~1,060hPa (標高約1,000mまで)
寸法	高さ625×幅350×奥行295mm	酸素濃度	88~95%
重量	19.5kg	酸素流量 (L/分)	0.25/0.50/0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 3.50/4.00/4.50/5.00
電源	AC100V(50Hzまたは60Hz)	警報	【電源供給停止】コンセントランプの表示と音によりお知らせし、装置が停止 【装置異常】【流量異常】【圧力異常】要連絡表示と音によりお知らせし、装置が停止 【酸素濃度低下】濃度低下・要連絡表示と音によりお知らせ 【チューブ折れ】チューブ折れ表示と音によりお知らせ 【加湿器外れ】加湿器外れ表示と音によりお知らせ 【バッテリー残量】バッテリー残量低下表示と音によりお知らせ
消費電力	流量 5.00L/分…175W 3.00L/分… 98W 【内部バッテリー使用時】 定格電圧 DC25.9V	電撃に対する保護	クラスIIおよび内部電源機器 B形装着部
EMC	JIS T0601-1-2:2018に適合	運転音 (無響音室平均値)	流量 5.00L/分：32dB (A) 3.00L/分：27dB (A)

◎当商品は医薬品医療機器等法第二条に定められた医療機器であり、医師の指示のもとに使用してください。
◎改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
◎このカタログの内容は、2023年7月現在のものです。

販売名:O₂グリーン いぶき5SP
認証番号:221AGBZX00301000 特定保守管理医療機器

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
TEL. 03-3578-7813

製造販売業者:エア・ウォーター・メディカル株式会社 (埼玉川越市南台一丁目5番地1)
製造業者:エア・ウォーター・メディカル株式会社

23AW008_SZ