



シャワー入浴装置

びあみ

美浴[®]

地球の恵みを、社会の望みに。



〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
メールアドレス：info-viami-h@awi.co.jp

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様及び価格の変更を行うことがあります。
記載の内容は、2024年4月現在のものです。●商品に関する不明な点は担当セールス
または、エア・ウォーター・メディカル(株)までお問い合わせください。●各製品の設置
浴室には、暖房、換気扇の設備を推奨します。●設置現場の状況は各製品でそれぞれ
異なりますので、詳細につきましては、担当セールスまでお問い合わせください。
●諸事情により一部商品の販売を中止させていただく場合もありますので予めご了承ください。●本カタログの価格には消費税が含まれておりません。消費税が別途加算
されますので予めご了承ください。

▲安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

お申し込み・お問い合わせ

びあみ
美浴お客さま相談室

☎ 0120-048-067

製品サイト

<https://site.awi.co.jp/product/viami/>



エア・ウォーターのご紹介

産業ガス、医療ガスを事業基盤とする
エア・ウォーターは、医療・福祉分野に
トータル・ソリューションで応え、
人と社会を支え続けます。



エア・ウォーターでは、医療現場に欠かせない酸素等の医療用ガスをはじめ、高度化する先端医療の現場である病院設備、病院業務のアウトソーシング受託、医療機器のメンテナンス業務からデンタルや衛生材料、注射針といった多岐にわたる製品・サービスを展開しています。さらに在宅医療や福祉介護など地域医療にも積極的に取組んでいます。全国に展開する供給拠点とグループ会社の連携による「医療のトータルソリューションサービス」を通じて、社会に広く貢献していきます。

■会社案内

会社名	エア・ウォーター株式会社 (AIR WATER INC.)
設立年月日	1929年9月24日
代表者	代表取締役会長 CEO・最高経営責任者 豊田 喜久夫
資本金	55,855百万円
従業員	20,109名(連結)
事業内容	産業ガス関連事業、ケミカル関連事業、医療関連事業、 エネルギー関連事業、農業・食品関連事業 海水関連事業、物流関連事業、その他の事業

(2023年3月31日時点)



ストレッチャー式 シャワー入浴装置 NS5000

動画は
こちら >



リクライニング式 シャワー入浴装置 NB2500

車イス式 シャワー入浴装置 RS-05N

動画は
こちら >



コンパクト式 シャワー入浴装置 シャワーオール



CONTENTS

美浴シリーズの特長

快適性・安全性	03-04
介助負担軽減・コスト削減	05-06

NS5000 ストレッチャー式 シャワー入浴装置

NS5000の特長	07-08
仕様・価格・システム構成例	08

NB2500 リクライニング式 シャワー入浴装置

NB2500の特長	09-10
仕様・価格・システム構成例	10

RS-05N 車イス式 シャワー入浴装置

RS-05Nの特長	11-12
仕様・価格・システム構成例	12

シャワーオール コンパクト式 シャワー入浴装置

シャワーオールの特長	13-14
オプション品・標準付属品	14
システム構成例	14

関連製品・消耗品

コントロールボックス	15
ラフローラル/ピューロフレッシュ	16

モデルレイアウト

モデルレイアウト	17
美浴シリーズ外形図	18

関連商品

入浴関連商品	19
衝撃吸収マット ころやわ	20

美浴体感ショールーム


美浴体感ショールーム	21
販売・サービス拠点	22

快適性・安全性

心地よい入浴感と入浴リスクの低減により
快適で安心安全な入浴を実現します。


お湯に包まれるような柔和な感触が楽しめる「美浴」の魅力。

心地よい
入浴感

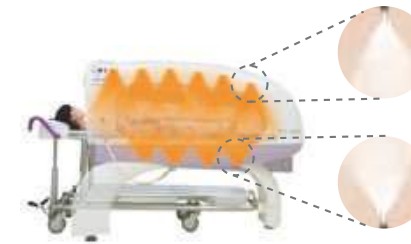

専用ノズルの配置にとことんこだわり、上質な入浴感を演出。約300ミクロンの微粒子シャワーが全身を包み込みます。

洗浄効果

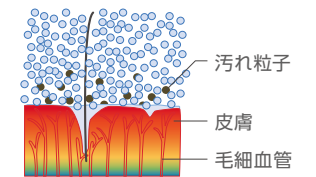


300ミクロン超微粒子シャワー

約300ミクロンの微粒子シャワーが毛穴の奥まで入り込み、汚れを流し落とします。

温熱効果

微粒子シャワーとサウナ効果で
3～5分の入浴で全身を芯まで温めます。

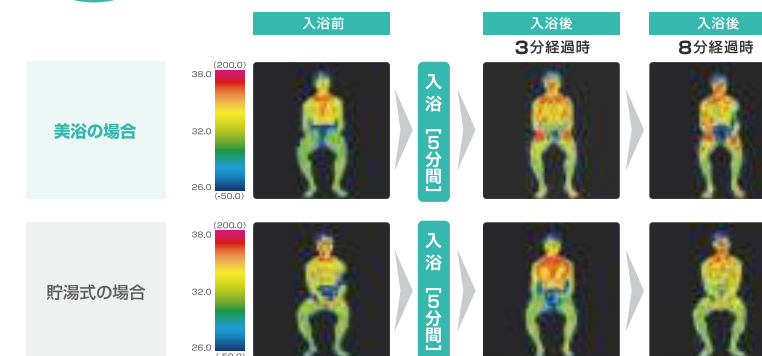

独自のドーム構造によるサウナ効果と微粒子シャワーの相乗効果により、2～3分で発汗作用が始まります。3～5分で身体全体が芯まで温まり、入浴後もしっかりと保温性を維持します。

40℃での計測データです。微粒子シャワーと貯湯式にそれぞれ5分間入浴して3分後及び8分後の体表面温度を計測。赤い部分ほど体温が高いことを示しています。

入浴介助時のリスクを低減し、安心とゆとりを提供。

失禁対策

つねに新しいお湯を使用し、失禁なども気にせずに清潔な入浴がおこなえます。

プライバシー保護

身体の露出が少なく、入浴者のプライバシーが守れます。

身体負担の低減

静水圧がかからず、入浴者は心臓や身体への負担が少ない入浴がおこなえます。

ヒヤリハットの軽減

入浴中に溺れたり、誤飲することも無く、リスク(ヒヤリハット)が軽減できます。

快適な浴室環境

浴室内に湯気、熱気がこもりにくいので、快適な浴室環境が保てます。

介助負担軽減・コスト削減

入浴介助負担とランニングコストを
低減し、ゆとりある介護を実現します。



入浴介助時間を大幅に短縮し、介助者の負担を減らします。

負担軽減
入浴準備

貯湯タイプ

15分

美浴

5分

お湯を貯める必要がないので、入浴準備時間は
わずか5分。準備時間を大幅に短縮します。

負担軽減
洗身・洗髪



ボタンひとつでボディーシャンプーが全身を包み
込み、入浴中に洗身・洗髪が可能です。中腰で
の作業が少なくなり介助負担を軽減します。

入浴介助時間の短縮

入浴介助時間は約10分!
貯湯式に比べ1/3と大幅に短縮されます。

■入浴手順(NS5000の場合)




専用ストレッチャーに入浴者を移乗し、
本体ドーム内へゆっくり移動



本体シャワーで体をあたためながら、
ハンドシャワーを利用して洗髪



専用ボディーソープで
やさしく洗身

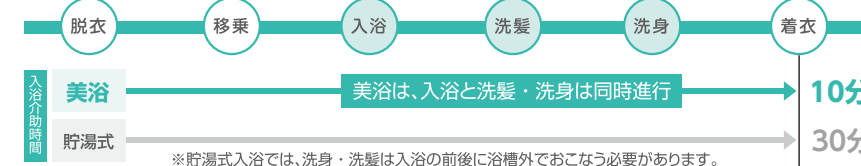

30分
導入前

10分
導入後


美浴なら
所要時間10分!
貯湯式に比べ1/3の
時間で入浴完了!

少ない湯量で入浴が可能なので、水道代・光熱費を削減します。


貯湯タイプに比べ使用湯量を約70%も節水できます。

これにより上下水道、ガス料金を大幅に低減し、ランニングコストを削減します。

1人1回あたりの使用料

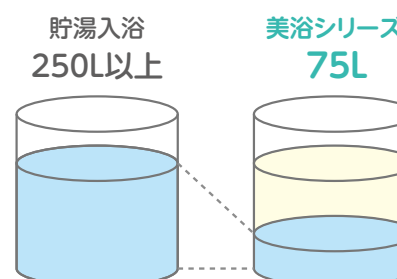

上下水道料金比較

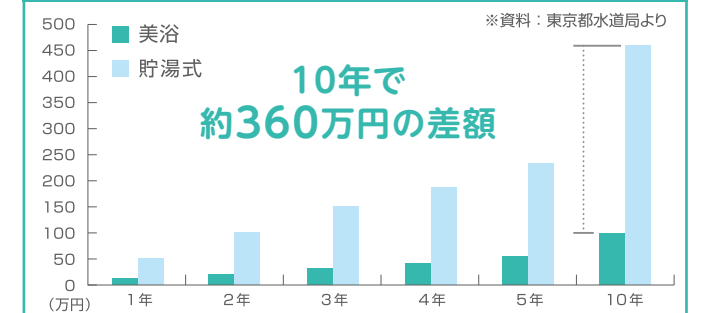

【比較条件】美浴:20人/日×20日間/月(75L/人) 貯湯:20人/日×20日間/月(250L/人)

寝たまの姿勢でゆったりくつろぐプレミアムタイプ

- 寝浴式なので、座位が取れない方でもご利用可能
- 楽な姿勢で身体を洗えるワイドサイド介助窓を採用
- 入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上



介助窓からの洗身



ハンドシャワー洗髪



動画は
こちら

心地よい入浴感を実現する独自の工夫

- シャワーが身体全体を包み込むように上下3ラインに16基のノズルを配置しており、背中にもシャワーが当たります。
- ドーム内天井から冷たくなった水滴が落下しないようにエンボス加工を施しています。



シャワーノズル配置箇所

身体を洗うことをしっかり考えたワイドサイド介助窓

- 大きな介助窓により、ムリのない姿勢で、効率よく的確に身体が洗えます。
- 観察窓、介助スリット付きカーテンにより、入浴者の状態を観察しながら介助がおこなえます。




観察窓

介助スリット

ストレッチャーは高機能の電動式と軽量の足踏式の2種類

電動式昇降ストレッチャー NS-DST

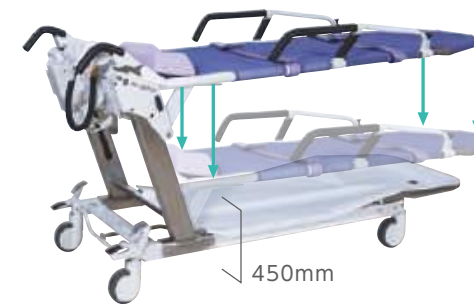

電動式昇降ストレッチャーなら、ボタン一つで昇降可能。
床面から450mmまで下がるのでロータイプの車椅子からの移乗も楽にできます。



着脱式バッテリー
バッテリーが着脱式のため充電の際にストレッチャーを移動する手間がかかりません。



トータルロック機能
足元のペダルの操作で4輪トータルロックと直進方向への方向規制ができます。

足踏式昇降ストレッチャー RS-10WASB-TL



足踏式昇降ストレッチャーなら、重量を感じさせない軽快な取り回しが可能です。

仕様・価格・システム構成例

NS5000 本体	¥4,300,000 (税別)
●外形寸法	2,008D×948W×1,510Hmm
●質量	125kg
●材質	FRP
●シャワーノズル数量	16基
●本体シャワー流量	約13ℓ/min

電動式昇降ストレッチャー NS-DST	¥3,050,000 (税別)
●外形寸法	2,140D×630W×608~958Hmm
●質量	86kg
●材質	ステンレス/ABS
●昇降ストローク	350mm
●キャスター	φ125mm (4輪トータルロック機構付)

足踏式昇降ストレッチャー RS-10WASB-TL	¥2,040,000 (税別)
●外形寸法	2,127D×680W×746~996Hmm
●質量	73kg
●材質	ステンレス/ABS/FRP
●昇降ストローク	250mm
●キャスター	φ150mm (4輪トータルロック機構付)

コントロールボックス CX-50V	¥2,050,000 (税別)
--------------------------	------------------------

■システム構成例



ポイント

ストレッチャーを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

幅広くお使い頂けるリクライニングタイプ

- 楽な姿勢で入浴ができるので、幅広い方にご利用可能
- ストレッチャータイプよりもコンパクトだから介助スペースを広々確保
- 入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上



観察窓と介助窓



ハンドシャワー洗髪




肩から足先まで「あたたかさ」を実感できる心地いい入浴感

- 上部と両横の3方向に合計21基のシャワーノズルを配置しています。
- 扉を閉めることで保温性が高まり背中までしっかり温まります。
- 突起のない、埋め込み式ノズルを採用しています。



開放感のある構造

- 本体内部は、横幅と足元に余裕を持たせ、身長180cmを超える入浴者でもゆったり入浴できます。
- 入浴者が圧迫感を感じないよう、開放感のある視野を確保しました。

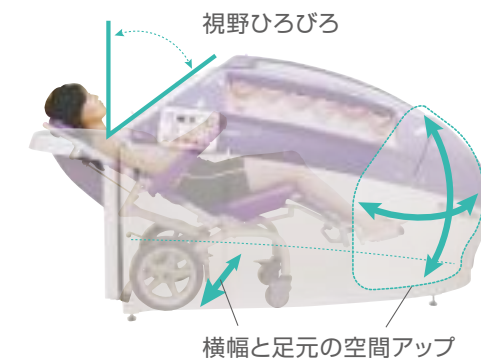

弊社従来機と比較して
内部空間
約**30%**
拡大

移乗しやすく、快適なリクライニングチェア

- 角度調節のしやすいリクライニングを採用しました。
- ご利用者が立ち上がりやすいようレッグ部を収納式にしました。
- フットペダルは、乗降性に優れたスイングアウト式です。

チェア2台運用で
効率UP!



専用チェアに座って

リクライニング



収納式

スイングアウト式

仕様・価格・システム構成例

NB2500 本体 ¥4,800,000(税別)

- 外形寸法 2,250D×1,090W×1,100Hmm
- 質量 75kg
- 材質 FRP
- シャワーノズル数量 21基
- 本体シャワー流量 約16ℓ/min

リクライニングチェア NB2500-C ¥1,450,000(税別)

- 外形寸法 通常時1,085D×615W×1,015mm
リクライニング時1,392D×615W×720mm
- 質量 31kg
- 材質 ステンレス/発泡ポリエチレン
- リクライニング機構 低圧ガスダンパー式
- リクライニング角度 30度～70度
- キャスター φ100mm(前輪)、φ300mm(後輪)
※後輪のみ2輪ロック方式

コントロールボックス CX-50V ¥2,050,000(税別)

■システム構成例



ポイント

チェアを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

車イス式 シャワー入浴装置 RS-05N

移乗性に優れたコンパクトなチェアタイプ

- 車椅子からの移乗がしやすいオリジナルチェア
- 設置場所の可能性が広がるコンパクト設計
- 入浴中の洗髪が可能



ハンドシャワー洗髪



安心感のある座位姿勢でリラックス

- 頭を起こした姿勢なので、視野も広く、入浴者も安心です。
- コンパクト設計により、サウナ効果が高く、しっかり温まります。



広々内部構造

車椅子からの移乗に配慮

- 足元のペダルを踏み込むだけで簡単に無段階で高さ調節が行えます。
- スウィング式の肘掛だから、車椅子からの移乗もスムーズです。



昇降ペダル



スウィング式 肘掛


安心でスムーズな移動、操作はシンプルで簡単

- チェアには安全ベルトが付いているので、安定した姿勢を維持します。
- 3×2.5mの浴室にも入るコンパクト設計です。



安全ベルト

コンパクト設計

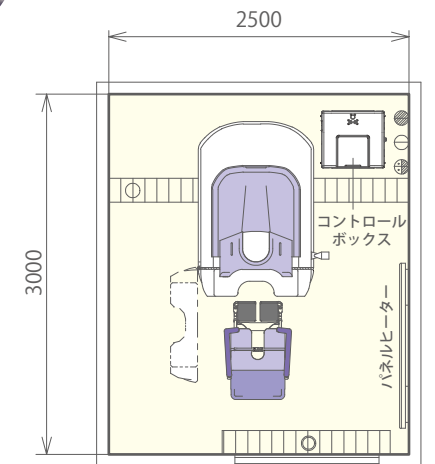

仕様・価格・システム構成例

RS-05N 本体	¥4,100,000(税別)
●外形寸法	1,453D×991W×1,155Hmm
●質量	70kg
●材質	FRP
●シャワーノズル数量	11基
●本体シャワー流量	約15ℓ/min
フリーチェア RS-05C2	¥750,000(税別)
●外形寸法	816D×562W×921~1,121mm
●質量	30kg
●材質	ステンレス/発泡ポリエチレン
●昇降方式	油圧ジャッキ式足踏方式
●昇降ストローク	200mm
●キャスター	φ100mm(4輪)
コントロールボックス CX-50V	¥2,050,000(税別)

■システム構成例



ポイント

チェアを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

コンパクト式 シャワー入浴装置 シャワーオール

設置場所に困らないコンパクトモデル

- 1畳ほどのスペースでも置ける超コンパクトタイプ
- バスタブをまたげない人でも使いやすい設計
- 浴槽内での洗身、洗髪が可能

※シャワーオール(居室タイプ)は、「経済産業省 平成28年度
ロボット介護機器開発・導入促進事業」に採択されています。

動画は
こちら



浴室タイプ **126万円**


居室タイプ **142万円**

居室タイプなら脱衣所など浴室以外にも設置が可能



シャワー入浴の心地よさをコンパクトに凝縮

- 奥行0.75m×横1.2mのコンパクト設計
なので狭いスペースにも設置可能です。
- 接続は混合水栓につなぐだけなので、
工事は最小限で済みます。
- コンパクト設計により、サウナ効果が高く、
しっかり温まります。

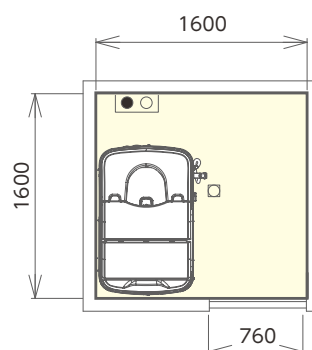

コンパクト
設計

バスタブをまたげない人でも使いやすい設計

- 浴槽のまたぎが15cmと低く、
転倒リスクを低減します。
- 手すりを使って自分でまたぐので、
ご利用者の自立支援につながります。



浴槽のまたぎ



手すり2箇所



浴槽内で完結するので、浴室での移動は最小限

- 浴槽内で身体を洗い、そのまま入浴できるので、
浴室内を行ったり来たりする必要がありません。

コンパクトなスペースで
充実の入浴



浴槽内での洗身



浴槽内での洗髪



しっかりシャワー入浴

オプション品



ハンドシャワー

洗髪や装置内洗浄の際にお使い
下さい。手元での水量調節及び
出湯切替が可能。

¥30,000(税別)



高さ調節用座面マット

低身長の方が使う場合は、
2セット追加推奨。

- 身長150cm 1セット追加(目安)
- 身長140cm 2セット追加(目安)

¥30,000(税別)

居室タイプ 標準装備



水位センサー

水位センサーが排水不良を
検知し、自動で給水ストップ。
水漏れを防ぎます。



排水ポンプ

排水場所が遠い場合に
ご使用下さい。

■シャワーオール 本体 仕様

外形寸法	1,160D×740W×1,090Hmm
質 量	48kg
材 質	FRP(本体) PP(トップカバー・シールドカバー) アルミ樹脂コーティング/樹脂(手すり) 発泡EVA(座面マット) ターボリン(カーテン)

※浴室以外に設置する際は、防水カーペットや撥水加工マットを敷いてください。

シャワーノズル数量	11基
本体シャワー流量	水圧に依存
浴槽本体	トップカバー、シールドカバー、座面マット、 ミストシャワーノズル、手すり、防水カーテン
電源(居室タイプ)	水位センサー：9V電池1本/フロート式 排水ポンプ：AC100V 50/60Hz

コントロールボックス CX-50V

¥2,050,000(税別)



操作性を高めた新型モデル

- デジタル式温度調整機能を搭載
- 37～44℃の間を1℃単位で設定可能
- 一定の範囲を超える水温のシャワーは供給を止める安全機能
- 設定した入浴時間の経過を操作パネル上に表示する入浴時間表示機能を搭載
- 音声機能搭載により、入浴準備の完了や入浴時間の経過を音声でお知らせ
- 本体温め機能により、一人目の入浴から保温効果を高めてご使用可能
- ボディーシャンプー、除菌剤もボタン一つで噴霧可能

外形寸法	478D×524W×503Hmm
質量	32kg
電源	AC100V 50/60Hz アース付き
材質	ステンレス/FRP
安全機能	冷温水遮断機能

CX-50V 操作パネル 使用方法



ラフローラル (美浴シリーズ専用ボディーソープ)

¥34,000(税別)



■容量4kg/本(1箱4本入り)

肌にやさしく、豊かな潤いに満たされる

- 天然ヤシ油を原料とした低刺激でマイルドな美浴専用のボディーソープ
- 保湿成分を配合し、肌にやさしく、しなやかで潤い豊かな感触が特徴です。
- フルーティーフローラルな香りが全身を包み込みます。

■配合保湿成分	●マイクロオーシャンコラーゲン	●アロエエキス
	●ヨモギエキス	●ペタイン

※マイクロオーシャンコラーゲンとは、分子量を1000分の1に微細化した皮膚浸透性コラーゲンです。真皮層まで浸透することで、肌の細胞の作り出す「コラーゲン」「ヒアルロン酸」の再生能力アップし肌に潤いを与えます。

本品を5倍に希釈し、ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。使用後は温水にて洗い流してください。

ピューロフレッシュ (美浴シリーズ専用除菌剤)

¥30,000(税別)



■容量4kg/本(1箱4本入り)

カンタンで安全な除菌が可能

- 水成二酸化塩素を用いた美浴専用の除菌剤
- 次亜塩素酸などに比べ、有害な副産物の生成が少なく、安全性に優れます。

■製品原料	水成二酸化塩素(化学品名:亜塩素酸ナトリウム)
-------	-------------------------

ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。使用後は温水にて洗い流してください。

付属品・オプション

ソフトマット大



NS5000専用

※足踏みストレッチャー用

- 入浴者の皮膚の負担を緩和いたします。
- サイズ:1,600D×480W×17Hmm
材質:ウレタン

¥10,000(税別)

ソフトマット2



- 入浴者の皮膚の負担を緩和いたします。
- サイズ:480D×480W×10Hmm
材質:ウレタン

¥3,000(税別)

特注ソフトマット 特注対応



NS5000専用

- 入浴者の皮膚の負担を緩和いたします。
- フルサイズ:1,745D×580W×10Hmm
材質:ウレタン 穴径:25mm

背上げマット




NS5000専用

- ストレッチャーにて手軽に入浴者の背部を上げる事ができるマットです。
 - 気管切開されている方や、姿勢保持にサポートが必要な方に有効にご使用いただけます。
- サイズ:700D×500W×150Hmm
材質:ウレタン

¥24,000(税別)


モデルレイアウト

NS5000

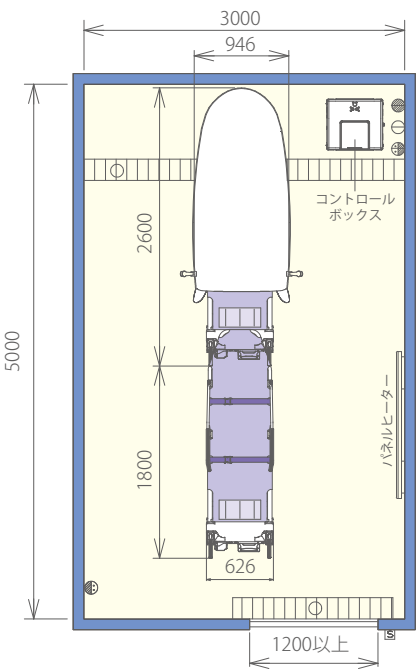


NO	商品コード	商品名	数量
①	NS5000-HON	NS5000本体	1台
②	CX-50V	コントロールボックス	1台
③	NS-DST	電動式昇降ストレッチャー	1台

NB2500

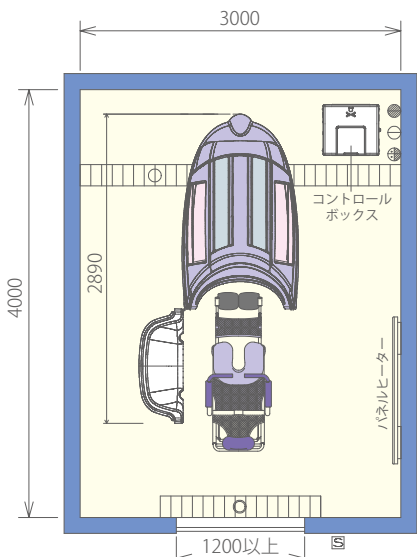


NO	商品コード	商品名	数量
①	NB2500-HON	NB2500本体	1台
②	CX-50V	コントロールボックス	1台
③	NB2500-C	リクライニングチェア	1台

RS-05N

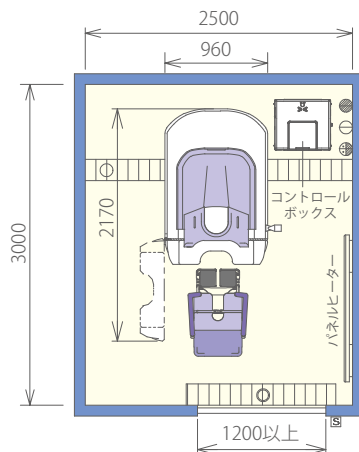

NO	商品コード	商品名	数量
①	RS-05N-HON	RS-05N本体	1台
②	CX-50V	コントロールボックス	1台
③	RS-05C2	フリーチェア	1台

浴室設備図

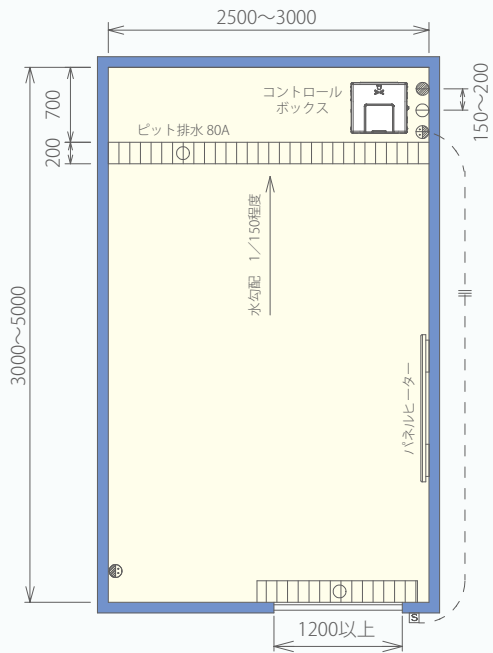

設置条件


給水・給湯配管	20Aボールバルブ止め
給湯圧	0.1~1.0MPa(要減圧弁)
給水圧	0.1~1.0MPa(要減圧弁)
※全館・給湯水各機器(厨房・給湯器等)使用にて湯水:0.1MPa以上必要です	
給湯温度	55°C±5°C 定温供給
電源	AC100V 15A 50/60Hz
	防水型コンセント(アース端子付)
	専用漏電遮断器を浴室外に付けて下さい
水勾配	専用ON/OFFスイッチを浴室外に付けて下さい
	1/150程度の緩やかなものにして下さい
その他	出入口幅は1200mm以上必要です
	浴室内に暖房・換気扇を設けて下さい
	給湯・給水の一次側工事は建設業者に一任致します

- 給湯: 20Aボールバルブ止(参考FL=約800 壁出し下向き)
- 給水: 20Aボールバルブ止(参考FL=約800 壁出し下向き)
- ⊕ 電源: AC100V 15A 50/60Hz 防水型コンセント(E端子付)(参考FL=約1000)
- ⓧ 専用漏電遮断器を浴室外(浴室入口付近)に付けて下さい


美浴シリーズ外形図

NS5000


本体

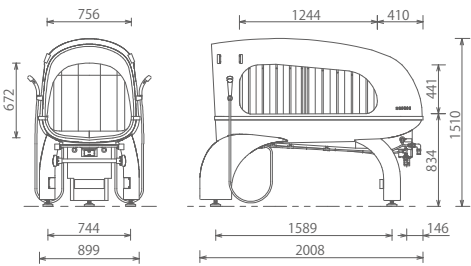

電動式昇降ストレッチャー
NS-DST

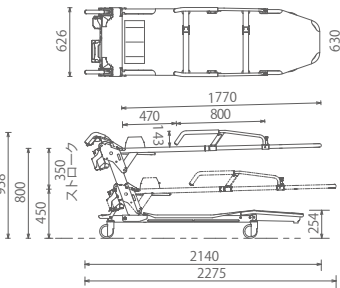


足踏式昇降ストレッチャー
RS-10WASB-TL

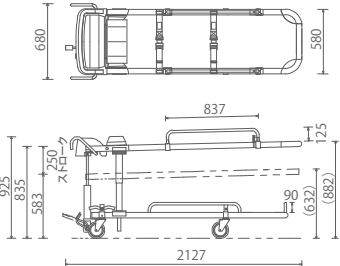


NB2500

本体

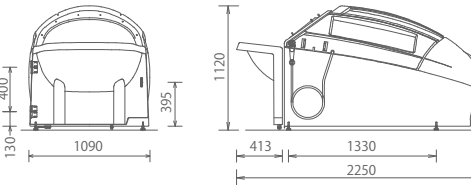


リクライニングチェア NB2500-C

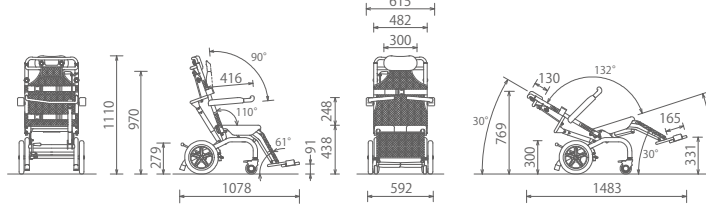


RS-05N

本体

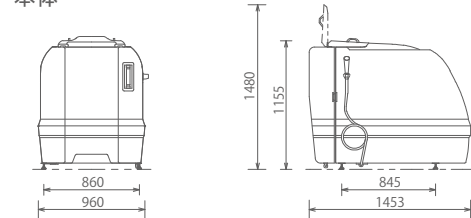


フリーチェア RS-05C2

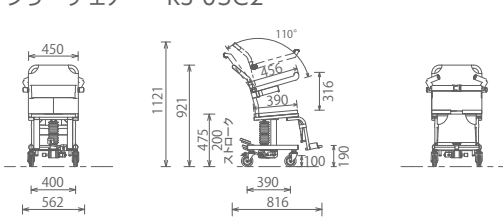

シャワーオール


浴室設備図

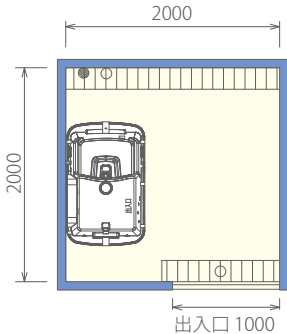

設置条件

給水・給湯	サーモスタット式混合水栓
給湯圧(推奨)	0.15~0.2MPa
排水能力	18L/min以上
床勾配	1/150以下
その他	出入口幅は760mm以上必要です
	浴室内に暖房・換気扇を設けて下さい
	給湯・給水の一次側工事は建設業者に一任致します

外形図

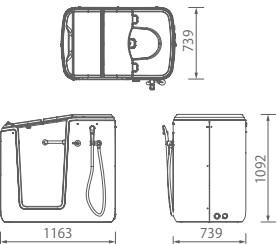

移乗関連商品 スライディングボード



- スライディングボードは患者様／利用者様の移動がスムーズにおこなえる超低摩擦素材でできた画期的なボードです。
- 患者様／利用者様を持ち上げず、しかも大勢の介助者を集めることなく少ない人数でスムーズな移動がおこなえます。
- 腰をサポートできるのも魅力です。
- スライディングボードは浴室での使用が可能です。
- タイプは、二つ折りができるスタンダードタイプと、取り扱いが簡単なショートタイプの2種類をご用意しています。

■使用方法

1

スライドシステムを広げ、約1/3を受ける側の方から体の下に挿入する。

2

確実に頭部と足がスライドシステムの上に乗っているか、腕の位置が移乗時に巻き込まれないかどうかを確認する。

3

押す側はひじをまげないように両手を伸ばし、入浴者の肩部と大腿を押す。

4

移乗が完了したらスライドシステムを取り除く。

5

これで全ての移乗が完了。

型 番	品 名	サイズ	素 材	価格(税別)
SB202431	スライディングボード本体(175×50) チューブ付	176×51cm	本体 ポリエチレン チューブ ナイロン	¥125,000
SBT202131	スライディングボード(175×50)用 チューブ	175×52cm	ナイロン	¥22,000
SBS202432	スライディングボードショート本体(85×50) チューブ付	85×50cm	本体 ポリエチレン チューブ ナイロン	¥80,000
SBST202132	スライディングボードショート(85×50)用 チューブ	88×51cm	ナイロン	¥14,000

お手入れの注意事項 ボード本体はぬるま湯または石鹸水で拭拭します。消毒が必要な場合は70％エタノールや45％イソプロパノールあるいはそれに近い消毒液をご使用ください。チューブは洗濯機で洗濯が可能です。柔軟剤の使用はお控えください。

水に沈む! お風呂専用クッション 入浴サポートクッションⅡ



- 施設内の特殊浴槽や、デイケア入浴サービスでの使用に便利。
- 表面は防カビ加工済、中身のビーズは抗菌剤入りでカビ抑制試験をクリア。
- クッションの角度調整を自由自在に出来るよう、中材のビーズはゆとりを持たせた分量になっています。

■使用イメージ

チェア上で首や足元を保護したり、浴槽内で首やひざの裏に当てて固定したりと、様々な使い方が可能です。

脇やひざの裏側、背中やひざの間など大小組み合わせて、浴槽内での体位の安定に使うことができます。

広げて首を安定させたり、二つ折りで脇の下に挟んだり、様々な使い方が可能です。

材 質 側地 表面／ポリエステル100％(立体メッシュ防カビ加工)
側地 裏面／ポリエステル100％(メッシュ)
中身／ポリエチレン(自洗抗菌バيبビーズ)

カラー ブルー

品 番	種 類	サイズ	重さ	価格(税別)
1126-A	枕型大	50×30×8cm	1220g	¥8,300
1126-B	枕型小	40×25×8cm	790g	¥6,000
1126-C	台形タイプ	38×18×4cm	280g	¥4,000

転んだ時の衝撃を吸収する置き床 ころやわ



「歩行安定性」と「衝撃吸収性」の両立を実現

- これまで両立が困難とされていた「歩行安定性」と「衝撃吸収性」という2つの性質を併せ持つ、転んだ時の衝撃を吸収する新しい置き床です。
- 歩行はもちろん、車椅子や杖での移動も可能です。

歩行時は硬い

転倒時の衝撃を吸収

通常時

衝撃が加わった時

品名	おくだけ ころやわ	サイズ	165cm×120cm
タイプ	3分割マット(1セット)	厚さ	2.2cm



設置事例

置くだけだから 煩わしい工事が不要

- その名の通り、置くだけで設置完了。
- 時間のかかる工事が不要だから余計な手間をかけずに導入いただけます。




移動・格納時

移動時の持ち運びやお手入れも簡単

- 「おくだけ ころやわ」は分割できるので、移動時の持ち運びも簡単にできます。
- 格納時も立てかけられる省スペース設計。
- 掃除・消毒も既存の床と変わらずおこなうことができ、丸洗いも可能です。

大腿骨転倒骨折や頭部外傷リスクも抑えられるから安心

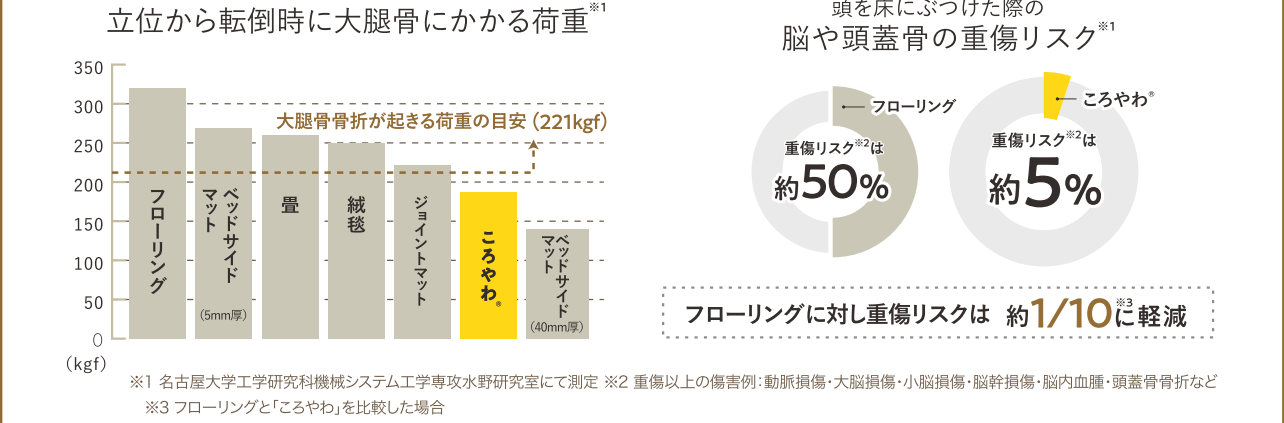

美浴体感ショールーム

是非、ショールームにて入浴感、操作性をご体感下さい。

※ショールームは完全予約制です。



美浴体感 ショールーム アクセスMAP



旭川ショールーム
〒078-8235 旭川市豊岡5条4丁目1番1号
お問合せ 0166-34-7868 (エア・ウォーター北海道旭川産業・医療営業所)
お問合せ 0166-31-1338 (エア・ウォーター・ライフサポート旭川営業所)
●宗谷本線「旭川四条駅」から約2.2km



釧路ショールーム
〒085-0032 釧路市新栄町17番20号
お問合せ 0154-23-9147 (エア・ウォーター北海道釧路産業・医療営業所)
お問合せ 0154-25-4088 (エア・ウォーター・ライフサポート釧路営業所)
●根室本線「釧路駅」から約1.4km



札幌ショールーム
〒065-0008 札幌市東区北8条東4丁目4番1号
お問合せ 011-212-1710 (エア・ウォーター北海道医療戦略部)
お問合せ 011-531-1345 (エア・ウォーター・ライフサポート札幌営業所)
●JR「苗穂駅」から徒歩約10分(約1km)
●地下鉄東豊線「東区役所前駅」より徒歩約10分(約1km)




福島ショールーム
〒963-8841 福島県郡山市字山崎400番地6
お問合せ 022-742-1210 (東北支社)
●東北新幹線・東北本線「郡山駅」から約2.8km
●東北自動車道「須賀川インター」から車で約20分



東京ショールーム
〒183-0035 東京都府中市四谷5-36
お問合せ 0120-048-067 (エア・ウォーター)
●京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」から約2.8km
●JR南武線・武蔵野線「府中本町駅」から4.3km
●中央道「国立府中インター」から車で約5分



千葉ショールーム
〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町210番地3
お問合せ 0120-048-067 (エア・ウォーター)
●JR総武本線「四街道駅」から約2.3km
●JR総武本線「稲毛駅」から約7.3km
●東関東道「千葉北インター」から車で約10分

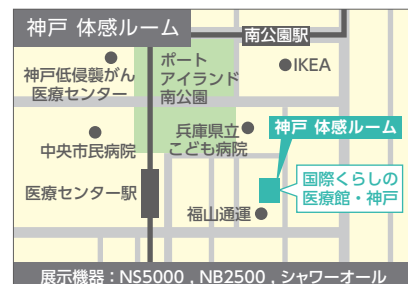

神戸 体感ルーム
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-3-1
お問合せ 0120-048-067 (エア・ウォーター)
●「三宮インター」から車で約15分
●ポートライナー「医療センター駅」から500m



京都ショールーム
〒601-8356 京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番3
お問合せ 0120-048-067 (エア・ウォーター)
●JR京都線「西大路駅」から約2km
●近鉄「上鳥羽口駅」から約2.3km
●名神高速道路「京都南インター」から車で約15分

美浴体感ショールームと販売・サービス拠点

■エア・ウォーター・ライフサポート(株) TEL.011-531-1313

■エア・ウォーター東日本(株)

■東北支社 TEL.022-236-4043

■甲信越支社 TEL.0263-78-6527

■本社・関東支社 TEL.03-3578-7817


■中部支社 TEL.052-621-4166

■エア・ウォーター西日本(株)

■本社・近畿支社 TEL.06-6252-1761

■中・四国支社 TEL.082-568-0525

■九州支社 TEL.092-915-0770

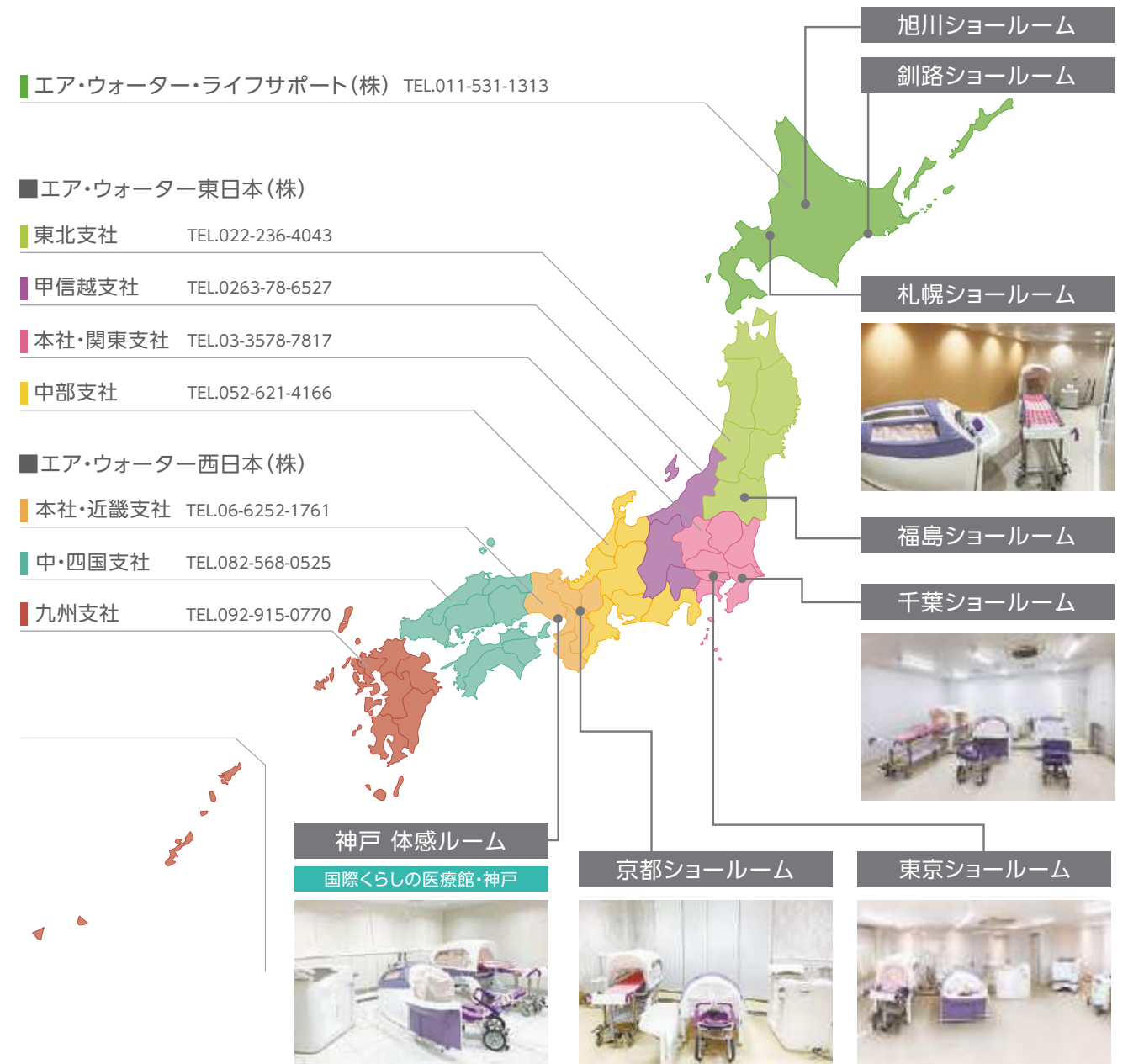

CADデータとカタログデータの請求は、下記ホームページまでお問い合わせください

<https://site.awi.co.jp/product/viami/>

Aw エア・ウォーター

国際くらしの医療館・神戸

「健やかなくらし」を目指す開発拠点。

<https://site.awi.co.jp/ki/>

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-3-1

みなさまが健やかにくらせるよう、
エア・ウォーターはこの地から
次世代事業の革新をめざします。

viami
4Fにて体感いただけます

